



## Veterinäramt

### ▶ Trichinenlabor

Marie-Paule Farkas  
Cheflaborantin  
Schlachthofstrasse 55, PF 448  
CH-4012 Basel

Tel.: +41 61 385 32 38  
Fax: +41 61 322 60 21  
E-Mail [marie-paule.farkas@bs.ch](mailto:marie-paule.farkas@bs.ch)  
[www.veterinaeramt.bs.ch](http://www.veterinaeramt.bs.ch)

An die Einsender von Proben  
für die Trichinenuntersuchung

### Merkblatt

Verschicken von Probenmaterial für die Trichinenuntersuchung

Bitte senden Sie folgende Proben zur Trichinenuntersuchung an unser Labor:

**Wildschweine:** Mindestens 20 g Muskulatur aus der **Zunge**, dem **Zwerchfell** oder dem **Antebrachium** (frei von Bindegewebe und Fett).

**Pferde:** Mindestens 20 g Muskulatur aus dem **Zungen-** oder **Kiefermuskel**. Alternativ: Eine grössere Probe vom **Zwerchfellpfeiler** (frei von Bindegewebe und Fett)

Bei **Fleischteilen** soll eine fettarme Probe möglichst nahe am Knochen oder der Sehnen genommen werden. Fleisch darf vor der Untersuchung nicht vorbehandelt worden sein (z.B. Kochen). Das Gewicht muss abzüglich Fett, Sehnen und anderen Gewebearten **mindestens 15 Gramm wiegen**.

**Bitte beachten Sie:** Bei positiven Untersuchungsergebnissen muss zwecks unabhängiger Untersuchung eine weitere 50 g schwere Probe der vorgenannten Entnahmeregionen entnommen werden.

**Kennzeichnen Sie Ihre Proben eindeutig. Das Antragsformular muss der Probe beiliegen.**

Verwenden Sie für das Verschicken von Probenmaterial dichte und dicke Plastiktüten. Kontrollieren Sie, ob diese wirklich **sehr gut verschlossen** sind, **keine Verpackung in Alufolie!**. Die äusserste Versandhülle muss stossicher und reissfest sein (z.B. kleine Kartonschachtel oder Umschlag aus Karton), damit während dem Transport per Post keine Flüssigkeit austritt.

**Für unsachgemäss verpackte, ausgelaufene Proben wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 erhoben. Allfällige Schadenersatzforderungen seitens der Post oder des Veterinäramtes Basel-Stadt durch ausgelaufene Probensendungen können dem Einsender zusätzlich in Rechnung gestellt werden.**

Bitte helfen Sie, unnötige Verzögerungen zu vermeiden. Terminieren Sie den Versand so, dass Proben nicht über das Wochenende ungekühlt bei der Post liegen bleiben. Sie verhindern damit lästige Geruchsimmissionen. Verpackte Proben können über das Wochenende/Feiertage bis zum Versand problemlos im Kühlschrank aufbewahrt werden (Nicht Tiefkühlung!).

**Besten Dank für Ihre Bemühungen.**

**Die Laborleitung**

Schalteröffnungszeiten: Montag bis Freitag  
08.00 - 11.30 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr